

VERIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL KIT Y FECHA DE RECEPCIÓN:

No aplica por ser Programa Online

PROPIEDADES:

Los casos, las imágenes y las preguntas se cargan en la página web PEESIGMA y están disponibles en las fechas de reporte que se notifican en el cronograma de reporte de Resultados (DEA-DOC-005).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El Programa de ensayo de Aptitud para Frotis de Sangre Periférica (FSP), está diseñado para realizarse de forma teórica, utilizando un caso clínico en cada evento, que contiene 4 microfotografías del montaje de frotis de sangre periférica y 1 Presunto Diagnóstico con una serie de preguntas de selección múltiple.

ALMACENAMIENTO/ ESTABILIDAD DE LAS MUESTRAS:

No aplica por ser Programa Online

INTENCIÓN DE USO:

El Programa de Ensayo de Aptitud para Frotis de Sangre Periférica (FSP), es cualitativo para identificar las células o estructuras y su presunto diagnóstico relacionado con las microfotografías.

INDICACIONES DE DETERIORO:

No aplica por ser Programa Online

PREPARACIÓN DE LA MUESTRAY ANALISIS:

1. Ingrese a la plataforma PEESIGMA.
2. Identifique la célula o estructura que se encuentra señalada en la microfotografía.

3. Seleccione de las opciones, la respuesta que considere correcta
4. En la pregunta 5 seleccione el presunto diagnóstico relacionado con las imágenes y el caso clínico.

LIMITACIONES:

No aplica

REQUISITOS SEGURIDAD:

No aplica

INSTRUCCIONES SOBRE LA REPOSICIÓN, DEVOLUCIÓN, DISPOSICIÓN DE LOS ÍTEMS DE ENSAYO:

No aplica por ser un programa 100% Online.

FECHA DE REPORTE DE LOS RESULTADOS

Muestra Q1:	19/02/24 - 29/02/24
Muestra Q2:	20/05/24 - 31/05/24
Muestra Q3:	20/08/24 - 31/08/24
Muestra Q4:	18/11/24 - 30/11/24

Los resultados deberán reportarse en la plataforma web PEESIGMA www.sigmagc.co antes de la fecha límite de reporte de los resultados.

Vea el videotutorial para ingreso de resultados en el siguiente link: <https://sigmagc.co/inicio/tutoriales-sigma/>

Si tiene dudas para gestionar su proceso de reporte de resultados en la plataforma, debe comunicarse 3 días laborales antes de la fecha final de reporte según cronograma, con el área de soporte Técnico de SIGMA QC, quien brindará apoyo para realizar el registro.

REPORTE DE RESULTADOS:

1. Ingrese a: www.sigmagc.co



2. Digite el Usuario y Contraseña que se le asignó previamente.
3. Ubique en el menú la Opción de Ingreso de Resultados y luego Gestión FSP.
4. Verifique que los datos de Inscripción del parámetro o prueba son correctos.
5. Una vez ingresados la totalidad de resultados, da clic en Guardar.

FECHA LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS:

Muestra Q1:	29/02/24
Muestra Q2:	31/05/24
Muestra Q3:	31/08/24
Muestra Q4:	30/11/24

INFORMES:

Los informes estarán disponibles en la plataforma PEESIGMA, 10 días hábiles contados a partir de la fecha de cierre de la plataforma de acuerdo al cronograma de reporte de resultados (DEA-DOC-005)

CONTACTOS:

SIGMA QC SAS
 ☎ Bogotá Colombia
 ☎ Pagina Web: <http://www.sigmagc.co>

Soporte Técnico:
soporte2@sigmagc.co • 317 3673213
soporte4@sigmagc.co • 318 5325182

