



NQSBU Urocultivo

Descripción:

Muestra enviada: pellet liofilizado de una sola cepa de microorganismo

Instrucciones de uso:

Método 1:

Coloque el pellet en una placa de medio de cultivo adecuado, arrastre e incube

Método 2:

- a. Transfiera el pellet a un tubo que contenga 2-3 ml de medio de cultivo líquido adecuado e incube.
- b. La muestra en lugar del medio de cultivo líquido se puede disolver con 100 µl de agua estéril.

Procese la muestra ya que es una muestra de paciente.

Almacenamiento:

Mantenga 2-8 °C.

Reconstitución de la Muestra:

Antes de la reconstitución de las muestras, llévela a temperatura ambiente.

Precauciones:

La muestra ha sido probada de acuerdo con las especificaciones y ha cumplido con los estándares de calidad.

Analitos:

Pruebas de identificación y susceptibilidad.

Origen de la muestra:

Ver pag.2

Mes	Muestra	Reseña Clínica	Antibióticos Recomendados
Febrero	Orina		
Abril	Orina		
Junio	Orina		
Agosto	Orina		
Octubre	Orina		
Diciembre	Orina		