



NQSMC **Micología General**

Descripción Muestra enviada:

pellet liofilizado de una única cepa de microorganismo

Instrucciones de uso:

Método 1: Colocar el pellet en una placa con medio de cultivo adecuado, arrastrar e incubar

Método 2: Transferir el pellet a un tubo que contenga 2-3 ml de medio de cultivo líquido adecuado e incubar.

La muestra en lugar de medio de cultivo líquido puede disolverse con 100 µl de agua estéril.

Analizar la muestra como si fuera una muestra de paciente.

Conservación:

Almacenar la muestra a 2-8 °C.

Reconstitución de la muestras:

Antes de reconstituir las muestras, llévelas a temperatura ambiente.

Precauciones:

La muestra ha sido probada de acuerdo a las especificaciones y cumple con los estándares de calidad.

Analitos:

Identificación y pruebas de susceptibilidad.

ORIGEN DE LA MUESTRA: VER ETIQUETA