

## SIGMA ALERGIAS

.....

Las muestras deben ser tratadas como las muestras de pacientes de acuerdo a las instrucciones del fabricante del instrumento, kit o reactivo en uso.

### CRONOGRAMA DE REPORTE

MUESTRA	APERTURA - FECHA LÍMITE
Muestra 1	22/02/2021 - 26/02/2021
Muestra 2	06/12/2021 - 10/12/2021


### ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga refrigerado a 2-8°C cuando no esté en uso. Proteja los frascos del calor y de la congelación. Los viales cerrados son estables hasta la fecha de expiración.

### INSTRUCCIONES DE USO

- Cada muestra contiene 1.0 ml de material de origen humano, líquido, listo para uso.
- Almacenado entre 2-8 ° C es estable hasta por lo menos la fecha de reporte.
- Retire la muestra de refrigeración, mezcle gentilmente, retire la tapa.
- Proceda según las instrucciones del método utilizado en el laboratorio.

### REPORTE DE RESULTADOS

Ingrese a:  → 

- Digite el Usuario y Contraseña que se le asignó previamente.
- Ubique en el menú la Opción de Ingreso de Resultados y luego Gestión Alergias.
- Verifique que los datos de Inscripción del parámetro o prueba son correctos.
- Una vez ingresados la totalidad de resultados, de clic en Guardar