

SIGMA COLORACIONES



Las láminas ya están coloreadas deben ser tratadas como las de pacientes de acuerdo a las instrucciones del fabricante del instrumento en uso.

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO


Las láminas están empacadas individualmente en un portaobjeto plástico, esto permite que se almacenen hasta la fecha de reporte determinada.

INSTRUCCIONES DE USO

El programa de Coloraciones tiene dos tipos de muestra:

- Lámina coloración **Ziehl-Nielsen** coloreada lista para enfocar en el microscopio. Leer como muestra de rutina.
- Lámina coloración **Gram**, coloreada lista para enfocar en el microscopio. Leer como muestra de rutina.

REPORTE DE RESULTADOS

Ingrese a: → 

- Digite el Usuario y Contraseña que se le asignó previamente.
- Ubique en el menú la Opción de Ingreso de Resultados y luego Gestión Coloraciones.
- Verifique que los datos de Inscripción del parámetro o prueba son correctos.
- Una vez ingresados la totalidad de resultados, de clic en Guardar