

## SIGMA PARASITOLOGÍA

.....

### ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO


Mantenga refrigerado a 4-30°C cuando no esté en uso. Proteja las muestras del calor y de la congelación. Los viales cerrados son estables hasta la fecha de expiración.

### INSTRUCCIONES DE USO

El programa de Parasitología tiene dos tipos de muestra:

- Suspensiones fecales en formalina. Retire la muestra de refrigeración, deje atemperar durante 2 minutos, mezcle cuidadosamente y proceda como una muestra de rutina.
- Lámina FSP, coloreada lista para enfocar en el microscopio. Leer como muestra de rutina.

### REPORTE DE RESULTADOS

Ingrese a:  → 

- Digite el Usuario y Contraseña que se le asignó previamente.
- Ubique en el menú la Opción de Ingreso de Resultados y luego Gestión Parasitología.
- Verifique que los datos de Inscripción del parámetro o prueba son correctos.
- Una vez ingresados la totalidad de resultados, de clic en Guardar