

SIGMA QUÍMICA CLÍNICA

.....

Las muestras deben ser tratadas como las muestras de pacientes de acuerdo a las instrucciones del fabricante del instrumento, kit o reactivo en uso.


ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga refrigerado a 2 - 8° C cuando no esté uso. Proteja los viales del calor y de la congelación. Los viales cerrados son estables hasta la fecha de expiración.

INSTRUCCIONES DE USO

- Al retirar de la nevera deje atemperar durante 15 minutos.
- Los controles deben ser disueltos con 5 ml de agua destilada y o des ionizada que se encuentre a temperatura ambiente.
- Mezcle durante 40 segundos sin agitar.
- La muestra debe ser procesada en el transcurso de una hora después de reconstituido y no antes de 15 minutos.

REPORTE DE RESULTADOS

Ingrese a: → 

- Digite el Usuario y Contraseña que se le asignó previamente.
- Ubique en el menú la Opción de Ingreso de Resultados y luego Gestión Química.
- Verifique que los datos de Inscripción del parámetro o prueba son correctos.
- Una vez ingresados la totalidad de resultados, de clic en Guardar