

Encuesta Virus del dengue NS1 Prueba de antígeno (DENVAg)

Proveedor de EQA: ESfEQA GmbH

Heidelberg

Coordinador de la encuesta: Dr. D. Groche

Instrucciones de uso

Notas:

Las muestras deben considerarse potencialmente infecciosas. Las precauciones habituales en el laboratorio para muestras potencialmente peligrosas se aplican a estas muestras.

Las donaciones de sangre utilizadas para la producción resultaron HBsAg, anti-HIV 1/2 y anti-HCV.

Las muestras deben ser utilizadas únicamente por personal cualificado.



ADVERTENCIA: Contiene metilisotiazolonas.
H317 Puede provocar una reacción alérgica cutánea.



Este producto contiene material de origen humano humano y debe considerarse potencialmente potencialmente infeccioso.

Varias tareas del programa de ensayos de aptitud pueden ocasionalmente a subcontratistas cualificados.

Sin embargo, la ESfEQA es responsable ante los participantes del trabajo del subcontratista.

Los resultados de los análisis de muestras sólo podrán divulgarse a colegas de otros laboratorios una vez concluido el periodo de testeo. Al inscribirse y participar en este EQA los participantes aceptan las condiciones generales de ESfEQA GmbH. Éstas pueden consultarse en línea en www.esfega.eu.

1. Uso previsto

Las muestras están destinadas a utilizarse como material de control cualitativo para la evaluación externa de la calidad (EQA) en laboratorios médicos para: **Dengue Virus NS1 Antígeno**

2. Descripción del producto

Las muestras liofilizadas simulan muestras de suero humano. Las muestras positivas contienen proteína NS1 recombinante.

3. Almacenamiento y estabilidad

Las muestras deben almacenarse en posición vertical a 2-8 °C. Son estables al menos hasta la fecha límite de presentación de datos como se indica en las etiquetas de las muestras.

4. Preparación y análisis de las muestras

Para asegurarse de que todo el material liofilizado de la muestra se encuentra en fondo del tubo, centrifugue brevemente el tubo con el control liofilizado (por ejemplo, 30 segundos a 14.000 rpm) o golpee ligeramente el liofilizado hasta el fondo del tubo antes de abrirlo.

Reconstituir cada muestra añadiendo **0,3 mL de H2O (preferiblemente ddH2O) o diluyente incluido en su kit de ensayo.**

Deje que el control se reconstituya durante 5-10 minutos, agite suavemente e invierta el tubo cerrado para garantizar la homogeneidad.

Después de la reconstitución de las muestras, deben ser manipuladas/tratadas como muestras de pacientes, y las pruebas deben hacerse de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes de instrumentos y reactivos.

5. Fechas y presentación de los resultados de las pruebas

Períodos de prueba: Consulte las etiquetas de las muestras. Los resultados pueden presentarse en cualquier momento dentro del período de prueba indicado en las etiquetas de las muestras. Envíe sus resultados electrónicamente a la ESfEQA en <https://teqa.esfega.eu>. Póngase en contacto con su distribuidor local de programas ESfEQA o directamente con la ESfEQA si necesita ayuda con el registro en TEQA. Alternativamente, aunque no es lo preferible, utilice el formulario de resultados proporcionado en el sitio web de la ESfEQA. En ambos casos, indique el instrumento y el método utilizados para el análisis de las muestras. En TEQA, todas las entradas se confirman pulsando el botón «confirmar». La transmisión correcta de los resultados se indica mediante «datos guardados».

6. Plazo de presentación de datos

Las fechas límite para la presentación de resultados se indican en las etiquetas de las muestras (zona horaria GMT +1).

7. Informes y certificados

Los datos serán evaluados por la ESfEQA. Los informes Los informes y certificados individuales de los laboratorios pueden consultarse en línea

IFU _DENVAg, Ver001

ESFEQA GmbH . Phone: + 49 6221 4166-700
Siemensstr 38 Fax: + 49 6221 4166-790
69123 Heidelberg info@esfeqa.eu
Germany www.esfeqa.eu